

SILICOL GEL

FÓRMULA AVANZADA PARA CICATRICES

Uso externo

SILICOL GEL Fórmula avanzada para cicatrices es un gel tópico 100 % de siliconas para el tratamiento de cicatrices de cirugías y artroscopías, lesiones y quemaduras. Es un gel ligero de silicona de secado rápido, sin color y sin olor, para el tratamiento de cicatrices de cualquier etiología y edad. Ha demostrado aplanar, suavizar y alisar las cicatrices, aliviar el prurito y el dolor, reducir la decoloración, el enrojecimiento y el malestar asociado a las mismas. Es una fórmula adecuada para el uso en niños mayores de 2 años y en personas con piel sensible.

Indicaciones:

Cicatrices queloides, hipertróficas, cicatrices de cirugía plástica o tras procedimientos cosméticos (láser, peeling), postraumáticas, cicatrices tras procedimientos quirúrgicos (cesáreas, histerectomías, cirugía ortopédica), cicatrices por quemaduras.

Modo de uso:



1. Asegúrese de que el área a tratar esté limpia y seca.
2. Aplicar una muy fina capa sobre la piel 2 veces por día.
3. Dejar secar 4 a 5 minutos.
4. Duración del tratamiento: 2 a 3 meses.

Frecuencia de uso: Dos o más veces por día.

Conservación: Conservar en recipiente cerrado entre 15° y 25°.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

1005927

LABORATORIOS SZAMA S.A.

Leg. 6819. RES N° 155/98

Elaborado en Argentina

S Z A M A

70 AÑOS EN
DERMATOLOGÍA

➔ 0810 • 444 • 32267

➔ www.savant.com.ar

SAVANT